



HANTERINGSSINSTRUKTION FÖR OXYAL® TRIPLE ACTION*

1. Avlägsna locket på flaskan innan varje användning






Observera vid första användandet/när flaskan inte har använts på länge: Rikta flaskan nedåt, pumpa flera gånger, upp till högst 20 gånger, tills en droppe kommer ut.

2. Tre olika varianter att hålla flaskan på

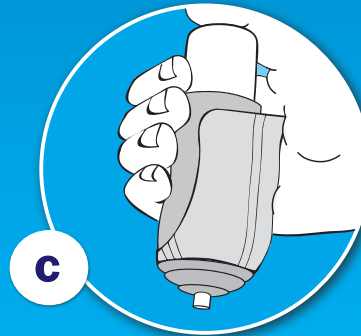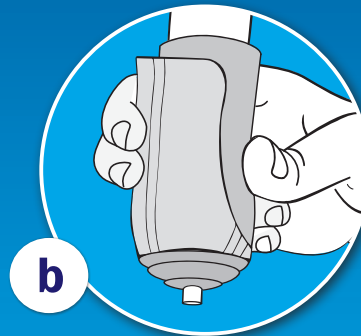


3. Håll flaskan i en vertikal position ovanför ditt öga och tryck ihop pump-mekanismen för en droppe

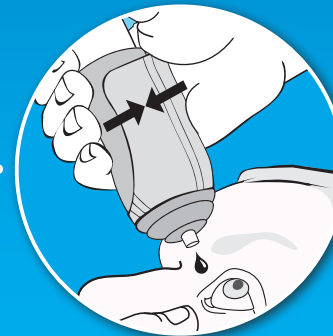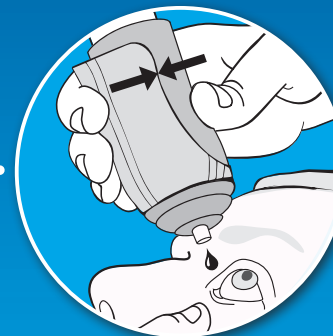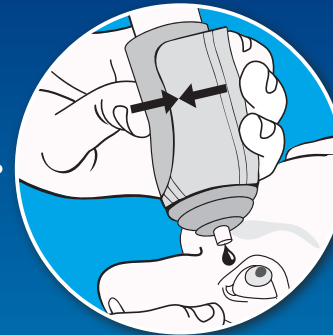


4. Sätt tillbaka locket


Alternativa droppmöjligheter

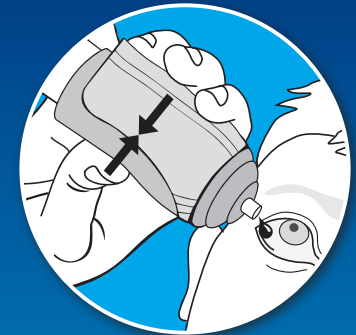

I sidled vid ögonens yttre hörn

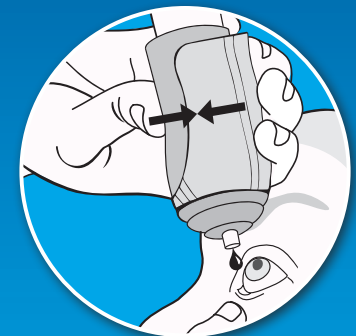

Stöd handen vid ögonbrynet

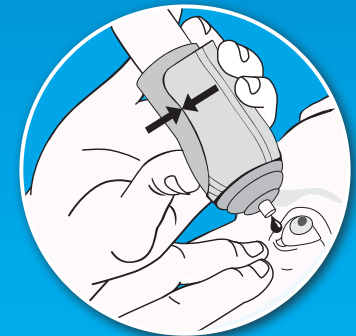

Stöd handen på andra handen