

Vänligen läs dessa instruktioner noggrant – de innehåller viktig information om hur produkten ska användas. Om du har några frågor, vänligen tala med apotekspersonal, läkare eller kontakta oss.

BAUSCH + LOMB

SE

Oxyal[®] TRIPLE ACTION

0.24% natriumhyaluronat, karbomer, glycerol, lipidkomponent, natriumhydroxid och renat vatten

Avsedd användning: Smörjande för ögat

Vad är Oxyal Triple Action?

Oxyal Triple Action är en ogenomskinlig ögondroppe som innehåller 0,24 % hyaluronsyra (som natriumhyaluronat), karbomer, glycerol, lipidkomponent, natriumhydroxid och renat vatten.

Den avancerade beredningen tolereras väl eftersom den inte innehåller konserveringämnen eller buffer.

Öppnad flaska kan användas i 6 månader.

När används Oxyal Triple Action?

Oxyal Triple Action är en smörjande ögondroppe som stärker tårffilmens alla tre lager för att förbättra den mjukgörande effekten på ögats yta vid torra ögon.

När ska du använda Triple Action?

Oxyal Triple Action är utformad att stanna kvar på ögats yta för att ge en intensivt smörjande effekt för direkt och långvarig lindning. Det är en ideal produkt för alla som lider av olika symtom på torra ögon så som trötta, stressade, grusiga, brännande och/eller rinnande ögon.


Hur ofta och hur länge ska du använda Oxyal Triple Action?

Droppe en droppe **Oxyal Triple Action** i ögat när behovet uppstår. Du kan använda den varje dag och så ofta du vill.

Hur används Oxyal Triple Action?

Observera! Innan första användandet och när flaskan inte har används på länge:

Ta av locket och rikta flaskan nedåt, pumpa uppretrade gånger, upp till högst 20 gånger, tills en droppe släpper. Flaskan är nu redo att användas.

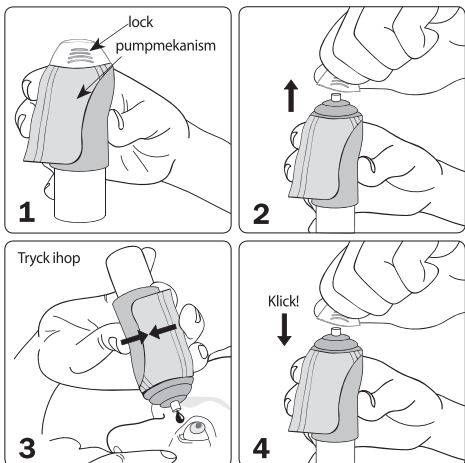

1. Tvätta dina händer inann du använder **Oxyal Triple Action** och håll flaskan som i bilden.

2. Avlägsna locket på flaskan innan varje användning Undvik kontakt mellan toppen på flaskan och dina fingrar eller annan yta för att undvika möjlig kontamination av vätskan.

3. Vänd på flaskan och luta försiktigt huvudet bakåt. Dra försiktigt ned ditt nedre ögonlock med ett finger, håll flaskan i en vertikal position ovanför ditt öga och tryck ihop pumpmekanismen för att droppe en droppe i ögat.

Undvik att vidröra ytan på ditt öga med toppen på flaskan för att undvika skada.

Blunda och himla med ögat för att sprida droppen över ögats yta.

4. Skaka bort resterande vätska direkt efter användning och sätt tillbaka locket på den torra toppen på flaskan.

När ska du inte använda Oxyal Triple Action?

Använd inte denna produkt om du är överkänslig mot någon av ingredienserna.

Viktig information om användning av Oxyal Triple Action?

- Lokala överkänslighetsreaktioner har väldigt sällan rapporterats. Användningen ska i sådana fall avbrytas.
- Denna produkt kan orsaka tillfällig dimsyn efter att den doppats i ögonen vilket kan ha negativ påverkan på att köra bil eller använda maskiner.
- Rör inte ögats yta med toppen på flaskan för att undvika skada på ögats yta eller kontaminering av vätskan.
- Skaka bort resterande vätska direkt efter användning.
- Ovarsam hantering av produkten i motsats till instruktionerna kan resultera i att produkten glider ut greppet och kan orsaka skada.
- Ta ur kontaktlinser inann användning.
- Vänta i cirka 15 minuter inann du använder en annan ögondroppe eller inna kontaktlinser återinsätts.
- Använd inte efter utgångsdatum.
- Använd inte om kartongen eller produkten är skadad
- Förvaras oåtkomligt för barn

Hu ska Oxyal Triple Action förvaras?

Förvaras vid temperatur +1 - +25°C.

Dr. Gerhard Mann,
Chem.-pharm. Fabrik GmGh
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin
Germany

STERILE A

Steriliserad med antiseptisk teknik
Steriloitu aseptisin metodein
Steriliseret ved bruk av aseptiske metoder
Steriliseret med antiseptisk teknik



Kassera produkten efter 3 månader efter öppnandet.
Terveysthuollon tarville on hävitettävä 3 kk kuluttua avaamisesta.
Kast flasken 3 månader efter første gangs åpning.
Kassér produktet 3 månader efter åpningen.

Distribueras av/Jälleenmyyjä/
distribueret af/distribuert av:
Bausch & Lomb Nordic AB
Söder Mälarstrand 45
104 65 Stockholm
SWEDEN



Temperaturintervall
Lämpötilarajoitus
Temperaturgrense
Temperaturinterval



Se bruksanvisning
Katsa käyttöohjeita
Se bruksanvisningen
Se brugsvejledning

CE 0483



Använd inte om forpackningen är skadad
Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut
Skal ikke brukes dersom pakningen er skadet
Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.



Används före
Käyt. viim.
Brukes før
Sidste anvendelsesdato

LOT Batchnummer
Eräkoodi
Batchkode