

## Biomedics 55 Evolution, 6-pk

Månadslinser från CooperVision

### Produktinformation

Biomedics 55 Evolution är månadslinser från CooperVision. Linserna är utvecklade med ett aberrationsfritt system som ger förbättrad syn, speciellt i miljöer med ett dåligt ljus. Linsen ger alltså ett förbättrat mörkerseende. Använder du idag Frequency 55, Frequency 55 AB eller Frequency 55 UV så kan du lugnt konvertera till Biomedics 55 utan att besöka optikern.

Observera att baskurva 8,8 endast finns att välja med plusstyrka. Baskurva 8,6 och 8,9 finns endast i minusstyrka. Tänk på detta om din baskurva inte finns om du börjar med att ange PWR i listorna.

### Korrigerar

Denna typ av lins korrigerar närsynt/översynthet. Rådfråga alltid din optiker.

### Hur skall jag använda linserna?

Biomedics 55 Evolution kan bäras upp till 1 månad i sträck. För bästa komfort skall linserna tas ut på kvällen när du ska sova, rengöras med linsvätska och läggas i ett linsetui med linsvätska över natten. Efter 1 månad ersätter du dessa med ett nytt par.

### Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser](#). (Öppnas i ny flik)

### Andra namn på samma lins

Hos optikerkedjorna säljs dessa linser under egna varumärken med namnen:

- Hos **Synsam** heter den Eye Q Premium
- Hos **Specsavers** heter den Easyvision Monthly Classic
- Hos **Synoptik** heter den iWear DR Comfort

Det är alltså exakt samma lins men där vi säljer tillverkarens originallins under dess rätta namn.

### Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.

<b>Antal linser i förp.</b>	6 st/box
<b>Baskurva</b>	8.6
	8.8
	8.9
<b>Bytesfrekvens</b>	1 ggn/ månad
<b>Diameter</b>	14.2
<b>Hanteringsfärgad</b>	Ja
<b>In- och utmärkning</b>	Nej
<b>Linstyp</b>	Månadslinser
<b>Material</b>	Ocufilecon D
<b>Syretransmission</b>	20 Dk/t
<b>Säljs även under namnen</b>	Eye Q Premium
<b>Tillverkare</b>	CooperVision
<b>UV-skydd</b>	Ja
<b>Varumärke</b>	Biomedics
<b>Vätskehalt</b>	55%

