

## EasySept Peroxidlösning, 120 ml

Linsvätska utan konserveringsmedel från Bausch + Lomb

### Produktinformation

- utan konserveringsmedel

EasySept® peroxidlösning är perfekt för personer som är allergiska mot konserveringsmedel i flerfunktionella vätskor, eller för dem som inte har fått rutin på "gnuggning" med flerfunktionella vätskor eller för dem som vill ha högsta nivå av desinficering.

EasySept Peroxidlösning är ett enkelt ett-stegssystem med effektiv proteinborttagning och desinfektion för att ge rena kontaktlinser som är bekväma att bära. En lösning utan konserveringsmedel som är mild mot känsliga ögon med ett linsetui som är lätt att använda och utformat med en speciell katalytisk platta. Använd inte EasySept direkt i ögat och sätt inte linserna direkt i ögat förrän de har neutraliserats helt till saltlösning (minimum 6 timmar). Trots att vätskan är tuff mot bakterier, är den snäll mot linserna. Den är säker att använda till alla mjuka och stabila (gaspermeable) kontaktlinser.

### Hur använder jag denna linsvätska?

Används för att rengöra, förvara, skölja och/eller desinficera. Öppnad förpackning skall förbrukas inom 3 månader.

### Övriga förpackningsstorlekar

- Flaska om 360 ml.
- Multi-Pack, set om 3 x 360 ml.

### Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

### Rådfråga din optiker

Rådfråga och följ alltid din optikers ordination om vilken linsvätska du skall använda till just dina linser.



**Tillverkare** Bausch + Lomb

**Varumärke** EasySept