

## Frequency Xcel Toric XR, 3-pk

Toriska månadslinser från CooperVision

### Produktinformation

För dig med astigmatism och som behöver bättre skärpa kanske Frequency Xcel Toric XR kan vara ett bra alternativ. Med sin unika design som gör att linsen håller sig på rätt plats i ögat, kan du som astmatiger uppleva en klar förbättring av din syn. Med den patenterade UltraSync® Technologi får du en stabil lins med minimal rotation. Linserna har en ljusblå färg för att du enklare ska kunna sätta in och ta ut dem.

Skillnaden mellan Xcel Toric och Xcel Torix XR är den senares större styrkeomfång.

### Korrigerar

Denna typ av lins korrigerar astigmatism. Rådfråga alltid din optiker.

### Hur skall jag använda linserna?

Frequency Xcel Toric XR kan bäras upp till 1 månad i sträck. För bästa komfort skall linserna tas ut på kvällen när du ska sova, rengöras med linsvätska och läggas i ett linsetui med linsvätska över natten. Efter 1 månad ersätter du dessa med ett nytt par.

### Råd vid rengöring

[Läs mer om hur du sköter dina linser.](#) (Öppnas i ny flik)

### Rådfråga din optiker

Kontakta din optiker om hur just du skall använda dina linser, och följ alltid din optikers ordination för hantering och användning.



<b>Antal linser i förp.</b>	3 st/box
<b>Axel</b>	5 – 180 (5/steg)
<b>Baskurva</b>	8.7
<b>Bytesfrekvens</b>	1 ggn/ månad
<b>Cylinder</b>	-2.75, -3.25, -3.75
<b>Diameter</b>	14.4
<b>Hanteringsfärgad</b>	Ja
<b>In- och utmärkning</b>	Nej
<b>Linstyp</b>	Månadslinser Toriska linser
<b>Material</b>	Methafilcon A
<b>Styrkeomfång (Pwr/Sphere)</b>	Se dropplisten under PWR
<b>Teknologier</b>	UltraSync Technology
<b>Tillverkare</b>	CooperVision
<b>UV-skydd</b>	Nej
<b>Varumärke</b>	Frequency
<b>Vätskehalt</b>	55%