

Lens-In

Lens-In

Produktinformation

Lens-In® är ett patenterat hjälpmedel som gör det lättare för dig att sätta in dina kontaktlinser. Med Lens-in® ser du var linsen är och kan sätta den på rätt ställe direkt. Inga fingrar som skymmer. Linsen ligger kvar på verktyget även om du håller den upp och ner.


BRUKSANVISNING Lens-in®

1. Tvätta händerna noga och ställ dig framför en spegel.
2. Placera linsen på den kupade delen på verktyget.
3. Håll i verktygets skaft och använd din andra hand till att öppna upp ögonlocket, om det behövs.
4. Applicera linsen direkt på ögat.

Verktyget får inte rengöras i vatten, använd istället din linsvätska och låt verktyget lufttorka.

Låna ej ut verktyget till andra personer.

För bästa hygien byt verktyg med jämna mellanrum, till exempel när du byter linsetui eller köper ny linsvätska.

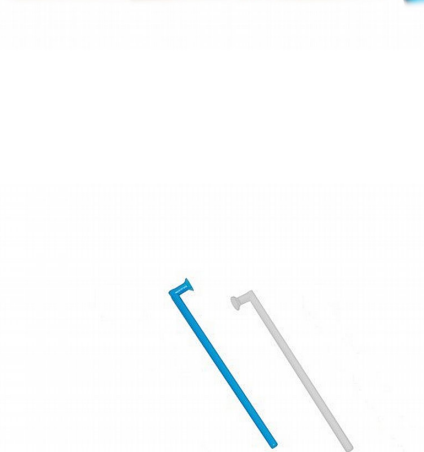

Varumärke Lens-In

Törstorp 251
463 97 PRÄSSEBO

559143-2520
VAT.nr
SE559143252001

5273-1957

www.lensia.se
Epost
support@lensia.se